









SI – NAVODILA ZA UPORABO Pregledne in zaščitne rokavice za enkratno uporabo, skladne z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.					
Navodila za uporabo je treba uporabljati v kombinaciji s specifičnimi podatki o izdelku na vsaki embalaži izdelka. Rokavice se prodajajo kot enota v paketu v škatli za pošiljanje. V primeru, da so izdelki v paketu ločeni in se prodajajo ločeno, mora distributer zagotoviti, da so navodila za uporabo priložena vsaki ločeni enoti. Rokavice so v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 in ustrezajo standardom EN/ISO, navedenim na vsaki specifični embalaži. Ta osebna zaščitna oprema je samo za enkratno uporabo in jo je treba odstraniti po kontaminaciji.					
RAZLAGA STANDARDOV IN SIMBOLOV:					
	Rokavice so samo za enkratno uporabo in niso za ponovno uporabo.		Zaščitite pred vlago.		Zaščitite pred sončno svetlobo.
	Primerno za stik z živili (razen kislih živil)		Izdelek vsebuje lateks		
	Skladno z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.	Lot No.	Serijska koda		
	Datum proizvodnje		Uporabno do		
PREVIDNOSTNI UKREPI				SESTAVINE / NEVARNE KOMPONENTE	
Pred uporabo vedno preverite, da na rokavicah ni mehanskih poškodb, npr. lukenj ali raztrganin. Ne uporabite poškodovanih rokavic. Izberite rokavice z dolžino primerno za vas, kajti tveganje za področje zapestja je minimalno. Pravilno nadevanje in snemanje rokavic je veččina, ki jo morajo vaditi zdravstveni delavci ali drugi, ki uporabljajo rokavice. Nadevanje je treba opraviti v pravilnem vrstnem redu, da se prepreči prenos okužb. Preden si nadenete rokavice, naj bodo roke čiste. Ko odstranjujete rokavice, se izogibajte stiku zunanje površine rokavic s kožo, ker je bila površina morda okužena s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami. Izogibajte se trganju, saj lahko to povzroči, da onesnaževalci brizgnejo v oči ali usta ali na kožo ali druge ljudi v bližini.				Nekatere rokavice lahko vsebujejo sestavine, za katere je znano, da povzročajo draženje kože ali alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih. Preverite opozorila na specifični embalaži. Formulacijo bomo posredovali na zahtevo.	
TEMPERATURNE OMEJITVE	NAVODILA ZA SHRANJEVANJE	NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE			
	Prostor za shranjevanje mora biti hladen, suh in brez prahu. Rokavice zaščitite pred viri UV svetlobe, sončno svetlobo, ozonom in oksidacijskimi snovmi. Shranjujte v originalni embalaži skladno s temperaturnimi omejitvami, označenimi na embalaži.	Rokavice odstranite v skladu z veljavnimi predpisi za material rokavic. Rokavice, kontaminirane s kemičnimi snovmi, je treba odstraniti v skladu s predpisi za zadevne kemikalije.			